


BAFÔMETRO DESCARTÁVEL REDLINE

DESCRIÇÃO GERAL : O REDLINE utiliza o princípio internacional de testes de ar expirado para indicar um NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE. Quando a bolsa é totalmente inflada e o ar esvaziado através do tubo teste, a presença do álcool modifica os cristais amarelos para a cor verde indicando se pode ou não dirigir e o limite entre infração administrativa e criminalização, prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

CALIBRAGEM: A marca vermelha indica 0,05 mg/L. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista terá suspensa a sua carteira, pagará multa e responderá criminalmente. Abaixo desta marca o condutor terá a suspensão da carteira e multa.

INSTRUÇÕES DE USO : Faça o teste somente 20 minutos após o seu último drinque.

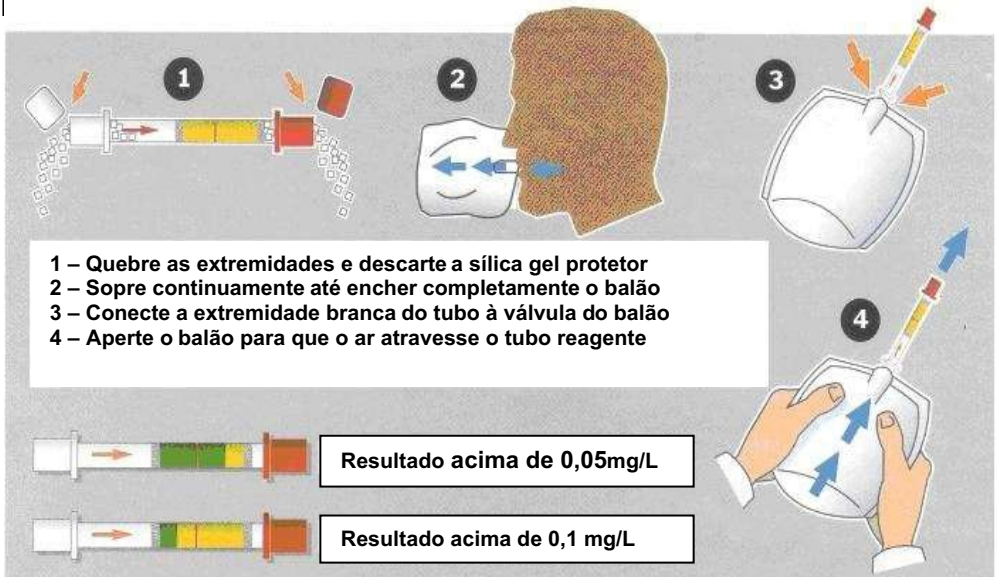

ATENÇÃO: Leia atentamente as instruções de uso e siga corretamente as orientações. O teste contém agentes oxidantes. Manuseie com cuidado e mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de contato acidental com os olhos ou pele enxágue imediatamente com bastante água e procure um médico. Armazene o produto em temperaturas inferiores a 30°C. Evite exposição prolongada à luz direta e ao sol. REDLINE é um produto internacionalmente certificado e confiável para auto uso como elemento de triagem de condutores de veículos e na medicina e segurança do trabalho, não devendo seus resultados se constituir evidência legal conclusiva. Princípio ativo: íon-dicromato - Reação: Cromatografia por oxu-redução.

Importado e distribuído exclusivamente por:

Orbitae Diagnósticos LTDA. ME - Av. Prudente de Moraes 840 Sala 601 Bairro Coração de Jesus Belo Horizonte - MG CEP - 30380-252 CNPJ - 11.162.384.0001-65 Inscrição Estadual - 00141402840000 Inscrição Municipal - 02467440014 www.orbitae.com.br orbitae@orbitae.com.br - Tel.: 31-3309-6648